

Käyttötarkoitus:

SILMÄLUOMIEN PUHDISTUKSEEN BLEPHACLEAN on tarkoitettu silmäluomien päivittäiseen puhdistukseen erityisesti

- jos sinulla on herkkä iho tai herkät silmäluomet tai silmät
- jos silmäluomista on puhdistettava pöly, siitepöly tai eritteet. Tämä voi kuulua osana allergian tai silmäinfektion hoitoon.
- jos silmäluomissa on tulehdus tai infektio, kuten silmäluomitulehdus, Meibomin rauhasen toimintahäiriö, näärännäppy tai luomirakkula. Nämä sairaudet voivat aiheuttaa kuivasilmäisyyden oireita, kuten silmien kutinaa, hiekan tunnetta silmässä, silmien aristusta ja/tai silmien punoitusta
- jos silmäluomet on puhdistettava ennen silmään tehtävää toimenpidettä, kuten ennen lääkkeen antoa pistoksena silmään (injektio lasiaiseen), silmien laserleikkausta (LASIK tai PRK) ja kaihileikkausta. BLEPHACLEAN on hyvin siedetty, joten sitä voi käyttää myös leikkauksen jälkeen lääkäri tai silmälääkäriin ohjeiden mukaan.

BLEPHACLEAN pitää silmäluomet puhtaina vahingoittamatta silmää ympäröivää ihoa ja sen luontaista bakteerikantaa.

Ennen silmäleikkausta: käytä kosteuspyyhkeitä **kahdesti päivässä** 5 päivän ajan tai lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

Muu käyttö: käytä **kahdesti päivässä** (aamuisin ja iltaisin) 3 viikon ajan ja sitten kerran päivässä 3 kuukauden ajan tai lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Jotkin sairaudet voivat olla pitkäaikaisia, jolloin silmäluomien puhdistusta voi olla tarpeen jatkaa pidempään.

Ei tarvitse huuhtoa vedellä käytön jälkeen.

BLEPHACLEAN sopii yli 3 kuukauden ikäisille lapsille.

Oftalmologisesti testattu.

Jos käytät piilolinsejä: linssit on poistettava ennen BLEPHACLEAN-kosteuspyyhkeen käyttöä.


Käyttöohjeet:

1. Silmäluomien ja silmäripsien puhdistaminen:

Avaa pussi ja ota kosteuspyyhe esille. Avaa kosteuspyyhkeen taitokset. Sulje silmät ja pyyhi silmäluomia


ja silmäripsien juuria varovasti kosteuspyyhkeellä.

Hiero silmäluomia varovasti pienin pyörein liikkein poistaaksesi mahdollisen karstan tai meikin sekä mahdolliset eritteet.

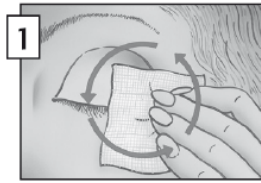

2. Silmäluomen reunan puhdistaminen:

Asetu peilin eteen ja avaa silmäluomea varovasti vetämällä silmäripsiä kevyesti alaspäin. Pyyhi silmäluomen reunaa varovasti rullaksi kierrettyllä kosteuspyyhkeellä.

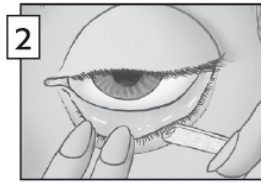

Ota uusi kosteuspyyhe ja puhdista toinen silmä samalla tavoin.

Käyttöä koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet:

Tarkoitettu käytettäväksi vain iholle. Ei saa käyttää suoraan silmään.

Älä käytä, jos olet allerginen jollekin ainesosalle.

BLEPHACLEAN on steriili tuote, joka on tarkoitettu **vain kertakäyttöön**.

Älä käytä samaa kosteuspyyhettä toistamiseen, koska tällöin sen puhdistusteho voi olla heikompi ja tulehdusriski voi suurentua.

Älä käytä kosteuspyyhettä, jos pussi on avattu tai vahingoittunut.

Kosteuspyyhkeiden (puhdistusmaidon) väri voi vaihdella. Tämä on normaalia ja johtuu tuotteen sisältämistä kasviuutteista.

Jos oireesi pahenevat, lopeta BLEPHACLEAN-kosteuspyyhkeiden käyttö ja käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty näkyvästi ulkopakkaukseen ja pussiin. Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee tuotetta, jonka pakkaus on ehjä ja jota on säilytetty ohjeiden mukaisesti. Hävitä käytetty kosteuspyyhe talousjätteiden mukana.

Säilytä 8–25°C.

EI LASTEN ULOTTUVILLE TAI NÄKYVILLE.

Mahdolliset sivuvaikutukset:

BLEPHACLEAN-kosteuspyyhkeiden käytön yhteydessä on ilmoitettu

seuraavia tapahtumia: polttava tunne tai kutina muutamia minutteja käytön jälkeen, silmäluomen punoitus tai turvotus, allergiset reaktiot.

Tuotteen kuvaus:

Steriili puhdistusmaitoa sisältävä kosteuspyyhe.

Puhdistusmaito sisältää:

kapryloyyliglysiini, natriumhyaluronaatti, PEG 8, poloksameeri 184, polysorbaatti 20, propyleeniglykoli, sammakonputkiuute (propyleeniglykoli, Centella asiatica -uute), säilytysaineeton talineritystä säätelevä kompleksi (propyleeniglykoli, kurjenmiekan juuriuute, sinkkisulfaatti, PPG-5 Ceteth 20 ja retinyyliipalmitaatti (A-vitamiini), alkoholi ja vesi), PEG 6 kapryyli-/kapriinihapon glyseridit (makrogoli-6-glyseroli-kaprylokapaatti), dikaliumfosfaatti, natriumhydroksidi, kaliumdivetyfosfaatti, puhdistettu vesi.

Käyttöohjeet on tarkistettu

viimeksi: helmikuu 2016

Valmistaja

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Ranska



Säilytä 8–25°C



Ei saa käyttää uudelleen



Älä käytä, jos pakkaus (pussi) on vaurioitunut



Steriloitu säteilyttämällä



Katso käyttöohjeita



Huomio



Viimeinen käyttöpäivä



Eränumero



Användningsområde:

RENGÖRING AV ÖGONLOCK

BLEPHACLEAN är avsedd för daglig rengöring av ögonlocken, särskilt:

- om du har känslig hud, ögonlock eller ögon,
- om du behöver avlägsna damm, pollen och sekret från ögonlocken. Detta kan vara en del av din ögonvård när du är allergisk eller har en ögoninfektion,
- om du har en inflammation eller infektion i ögonlocken såsom blefarit, dysfunktion i Meiboms körtlar, en vagel eller kronisk vagel. Dessa tillstånd kan orsaka symptom som av torra ögon, såsom kliande, grusiga, ömma och/eller röda ögon,
- om du behöver rengöra dina ögonlock före ingrepp i ögonen, såsom terapeutiska injektioner i ditt öga (intravitreal injektion), ögonlaseroperation (LASIK eller PRK) och operation för grå starr. Eftersom det tolereras väl kan BLEPHACLEAN även användas efter operation, baserat på vad din läkare eller ögonläkare säger till dig.

BLEPHACLEAN håller dina ögonlock rena samtidigt som den är skonsam mot huden runt ögonen och den naturliga bakteriefloran.

Före ögonoperation, använd **två gånger dagligen** i 5 dagar, eller i enlighet med vad din läkare eller apotekspersonal har sagt åt dig. För användning i de andra fallen, använd **två gånger dagligen** morgon och kväll i 3 veckor, och sedan en gång dagligen i 3 månader eller så länge som läkaren eller apotekspersonalen har sagt åt dig. Vissa ögonlocksåkommor är kroniska och du kan behöva fortsätta med rengöringen av ögonlocken under lång tid.

Behöver inte sköljas efter användning.


BLEPHACLEAN kan användas till barn äldre än 3 månader. Produkten har testats under oftalmologisk kontroll.

Om du bär kontaktlinser: du måste ta ut dem innan du använder BLEPHACLEAN

Användarinstruktion:

1. Rengöring av ögonlock och ögonfransar:
Öppna en påse och ta ut våtservetten. Stäng ögonlocket och applicera våtservetten försiktigt på ögonlocket och ögonfranskanten. Massera försiktigt ögonlocket med små cirkulära rörelser och ta

försiktigt bort eventuella rester av skorpbildningar, sekret eller smink.

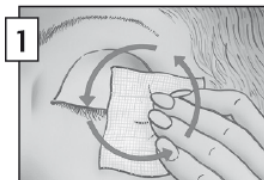

2. Rengöring av ögonlocks-kanten: Gör detta framför en spegel, öppna ögonlocket genom att försiktigt dra ögonfransarna nedåt. Rulla ihop våtservetten och gnugga försiktigt den nedre ögonlocks-kanten.



Upprepa på det andra ögat, med en ny våtservett.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

Endast för användning på hud, får inte appliceras direkt i ögat.

Använd inte om du är allergisk mot något innehållsämne.

BLEPHACLEAN är en steril produkt, **endast för engångsbruk.**

Använd inte våtservetterna igen eftersom detta kan innebära att de inte fungerar lika bra, samt att risken för infektion ökar.

Använd inte våtservetten om påsen är öppen eller skadad.

Färgen på våtservetterna (lotion) kan variera på grund av innehållet av naturliga växtextrakt, och detta är normalt.

Om dina symptom blir värre, sluta använda BLEPHACLEAN och kontakta läkare eller apotekspersonal. Använd inte efter utgångsdatumet som står på ytterkartongen och på påsen. Utgångsdatumet avser produkt i intakt förpackning som har förvarats korrekt.

Våtservetterna ska kastas i hushållsavfallet efter användning.

Förvaras mellan 8 och 25 °C.

FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Eventuella biverkningar:

Följande biverkningar har rapporterats vid användning av BLEPHACLEAN: brännande eller kliande känsla i några minuter efter användning, rodnad eller svullnad av ögonlocken, allergiska reaktioner.

Beskrivning av produkten:

Sterila våtservetter impregnerade med en lotion.

Lotionen innehåller: Kapryloylglycin,

natriumhyaluronat, PEG 8, poloxamer 184, polysorbat 20, propylenglykol, hydrocotylextrakt (propylenglykol, Centella asiatica-extrakt och vatten), Talgreglerande komplex utan konserveringsmedel (propylenglykol, rotextrakt från Iris florentina, zinksulfat, PPG-5 Ceteth 20 och retinylpalmitat (Vitamin A), alkohol och vatten), PEG-6-kapryl/kaprinsyra-glycerider (dvs Makrogol-6-glycerolkaprylokapat), dikaliumfosfat, natriumhydroxid, kaliumdivätefosfat, renat vatten.

Datum för uppdatering av produktinformationen: februari 2016

Tillverkare

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike



Förvaras mellan 8 och 25 °C



Återanvänd ej



Använd inte om förpackningen (påsen) är skadad



Steriliserad med strålning



Läs användarinstruktionen innan användning



Varning



Utgångsdatum



Batchnummer

